

Nachfolgende Anweisungen beziehen sich auf den mehrfachen Einsatz der Maske bei verschiedenen Patienten in Klinik und Schlaflabor. Sie beinhalten Angaben zu Reinigung, Desinfektion und Sterilisation der Maske nach ISO17664 und sind empfohlen und validiert durch Air Liquide Medical Systems.

<b>Dekontamination</b>	pH-neutrales Reinigungsmittel	Aniosyme DD1 (verdünnt auf 0,5%)	✓
<b>Desinfektion</b>	High-level thermisch	Entsprechend EN ISO 15883-1: 70°C - 100min, 75°C - 30min, 80°C - 10min, 90°C - 1min Europäischer Standard 93°C - 10min	✓
	High-level chemisch	Entsprechend Herstellerangaben: Opaster, Opaster Plus, Aniosept Activ (verdünnt auf 2% mit 5l H <sub>2</sub> O), Anioxyde1000, Cidex OPA	✓
<b>Sterilisation</b>	Sterrad™	100S, NX, 100NX	✓
	Autoklav	121°C - 15 min (250°F)	✓

Respireo Hospital F Non Vented Reusable wurde validiert für bis zu 20 Zyklen mit oben genannten Prozessen. Nähere Informationen und Sterilisationsprotokolle erhalten Sie unter [www.airliquidemedicalsystems.com](http://www.airliquidemedicalsystems.com) oder bei Ihrem Fachhändler.

## Kompatibilität

<b>Monnal T50</b> 	<b>Monnal T60</b> 	<b>Monnal T75</b> 	<b>Extend</b> 	<b>Beatmung mit Expirationsventil</b> 
✓	✓	✓	✓	✓

## Artikelnummern

<b>KM218800</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable – Größe S
<b>KM218900</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable – Größe M
<b>KM219000</b>	Respireo Hospital F Non Vented Reusable – Größe L
<b>KM222400</b>	Kopfband Respireo Hospital F (10 Stk.)



**Sterilisierbar:**  
Zur Wiederverwendung  
geeignet

### Die Klinikmaske mit dem Komfort einer Homecaremaske



- ermöglicht nicht-invasive, komfortable Beatmung
- zeitsparende, sichere Anwendung durch wenige Komponenten
- umweltfreundliche Lösung durch Mehrfachverwendung
- in 3 Größen erhältlich
- Anpass-Schablone griffbereit auf der Verpackung
- Maske komplett mit Kopfband und Maskenkissen

### Schnellanleitung

Stirnstütze mittels Drehknopf vollständig zum Patienten hinbewegen.

Kopfbänder nur leicht anlegen. Beatmung anschließen und Stirnstütze anpassen. Wenn nötig, Bänder nachkorrigieren.

Einfaches Ablegen der Maske durch Schnellverschluss.

