



1 Stirnstütze mittels Drehknopf vollständig zum Patienten hinbewegen.

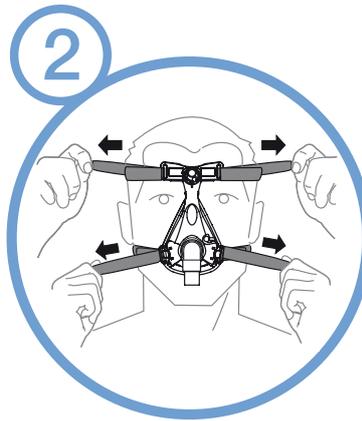

2 Kopfbänder nur leicht anlegen. Beatmung anschließen und Stirnstütze anpassen. Wenn nötig, Bänder nachkorrigieren.

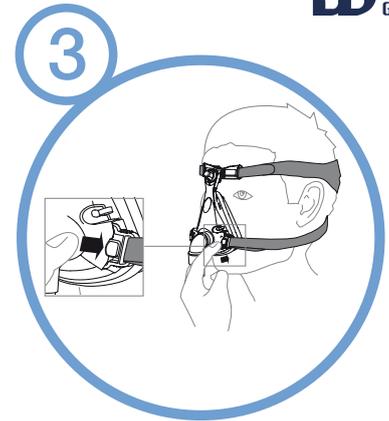

3 Einfaches Ablegen der Maske durch Schnellverschluss.

- biokompatibles medizinisches Silikon
- frei von Phtalaten
- frei von Latex

Kompatibilität

	Monnal T50 	Monnal T60 	Monnal T75 	Extend 	Beatmung mit Expirationsventil 	Leckage-Beatmung 
Respireo Hospital Non Vented	✓	✓	✓	✓	✓	X
Respireo Hospital Vented	X	X	X	X	X	✓

Artikelnummern

KM222100	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe S
KM222200	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe M
KM222300	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe L
KM226400	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe S
KM226500	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe M
KM226600	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe L

Respireo
Hospital F
Non Vented Disposable


Respireo
Hospital F
Vented Disposable

Einmalverwendung:
bis zu 7 Tage
pro Patient

Die Klinikmaske mit dem Komfort einer Homecaremaske



- ermöglicht nicht-invasive, komfortable Beatmung
- zeitsparende und sichere Anwendung durch wenige Komponenten
- Einwegartikel: erspart aufwändige hygienische Aufbereitung und Dokumentation
- in 3 Größen erhältlich
- Anpass-Schablone griffbereit auf der Verpackung
- Maske komplett mit Kopfband und Maskenkissen

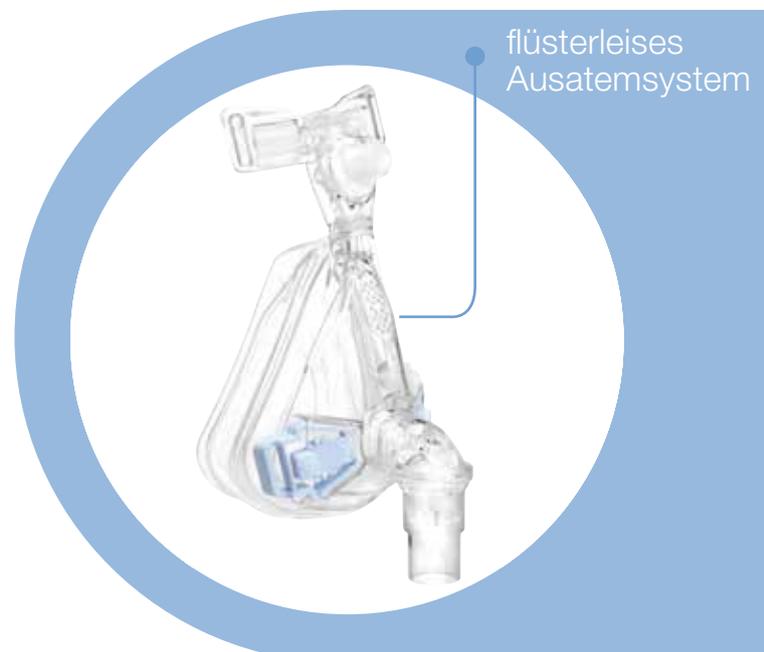

- Die bewährte Respireo Hospital F als **vented**-Version
- Identische einfache Anwendung (siehe Rückseite)