

seca 376

Funkfähige Säuglingswaage mit besonders großer Wiegemulde

PDMS integrated



- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless.
- Einstellbare Dämpfung.
- Hochwertige seca Wägetechnologie mit feiner 5 g Teilung.
- TARA, HOLD, Auto-HOLD und BMIF für besonderen Komfort.
- Extra große, ergonomische Mulde für sicheres Wiegen.
- Erweiterbar zur Messstation dank optionalem Längenmessstab.

seca 376:

Unruhiges Baby? Alles gut!

Ergonomisch, komfortabel und zeitsparend. Das sind die Stichworte zu der seca 376. Denn ihre großzügige Mulde ermöglicht sogar das Wiegen von Kleinkindern im Sitzen bis 20 kg. Und eine regelbare Dämpfungsfunktion sorgt zusammen mit der HOLD-Taste für schnelle, präzise Messergebnisse. Auch das mühsame Aufschreiben der Messwerte gehört der Vergangenheit an, denn dank der Funktechnologie seca 360° wireless kann die Waage sie kabellos an die seca 360° wireless Funkdrucker oder die Software seca analytics 105 auf Ihrem PC senden – wenn Sie es möchten.




Die muschelförmige Form garantiert hohe Sicherheit.

In der muschelförmigen Wiegemulde der seca 376 liegen Babies besonders sicher, denn ihre ergonomische Form ist speziell auf das Wiegen von Säuglingen ausgerichtet. Die hohen Seitenränder vermitteln Geborgenheit und bewahren sicher vor dem Herausfallen.



Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 376 auf Knopfdruck jeden Messwert an einen optionalen seca Funkdrucker oder an die Software seca analytics 105 auf Ihrem PC senden.

Besonderen Schutz gegen das Herausfallen gewährleisten die hohen Seitenwände der Wiegemulde.

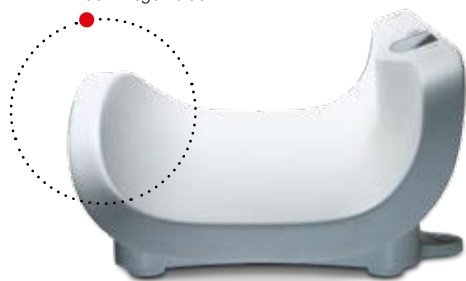

TARA, HOLD und BMIF beschleunigen das Wiegen.

Die seca 376 macht es Ihnen leicht, schnell zu sein: Mit langem Tastendruck auf die TARA-Taste errechnen Sie das Netto-Gewicht trotz Windel oder weicher Unterlage. Oder die Menge der beim Stillen aufgenommenen Milch – durch Menüauswahl der Funktion BMIF (Breast-Milk-Intake-Function). Schnell das Baby versorgen und erst dann den Messwert ablesen? Kein Problem dank der HOLD-Taste. Und wenn gewünscht, kann Auto-HOLD über das Menü aktiviert werden.

Ein optionaler Längenmessstab ermöglicht Wiegen und Messen zugleich.

Ein weiterer zeitsparender Vorteil der seca 376 ist der optional erhältliche Längenmessstab seca 233, der es Ihnen ermöglicht, in einem Schritt zu wiegen und zu messen. Selbstverständlich in der bewährten seca Qualität.



Mit dem optionalen Längenmessstab seca 233 wird die seca 376 zu einem kompletten Wiege- und Messsystem.

Papier- und fehlerlose Messwertübertragung per Funk.

Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 376 jeden Messwert an die optionalen seca 360° wireless Drucker senden. Mit der netzwerkfähigen Software seca analytics 105 und dem USB Adapter seca 456 können Messwerte auch von Ihrem PC empfangen, ausgewertet und einem vorhandenen Patientendatenmanagementsystem (PDMS) zur Verfügung gestellt werden. Damit ist die seca 376 PDMS integrated und bereit für die digitale Patientenakte und alle Anforderungen, die die Zukunft an sie stellt. Nähere Erläuterungen zu PDMS integrated unter www.seca.com.

seca 376

Technische Daten

- Tragkraft: 20 kg
- Teilung: 5 g < 7,5 kg > 10 g
- Maße (BxHxT): 620 x 190 x 358 mm
- Maße Wiegefläche (BxHxT): 615 x 130 x 275 mm
- Eigengewicht: 3,7 kg
- Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional
- Datenübertragung: Funktechnologie seca 360° wireless
- Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, Wägebereichumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
- Optional: Längenmessstab seca 233, Kopf- und Fußanschlag seca 418, Netzgerät seca 447
- Eichklasse: M_1
- Systemfähig mit: 360° wireless Drucker advanced seca 466, 360° wireless Drucker seca 465, Software seca analytics 105

