



# THERMOCARE *Vita*

Der Inkubator zur Wärme- und Intensivpflege von Säuglingen

# THERMOCARE Vita

## Der Inkubator zur Wärme- und Intensivpflege von Säuglingen

Die Frühgeburt ist der schwierigste Start in diese Welt und eine große Herausforderung für Ärzte, Pflege und Eltern. Sie geben Tag für Tag ihr Bestes, um den kleinsten Patienten diesen Start zu erleichtern und Leben zu ermöglichen.

Der Inkubator Thermocare Vita hilft ihnen, dieses Ziel zu erreichen. Er verbindet die Stabilität eines geschlossenen Klimaraumes mit den guten Zugangs- und Kontaktmöglichkeiten der offenen Pflege.

Da die Frühgeborenen meist die ersten Lebensmonate im Inkubator verbringen, ist Ruhe ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung. Im Inkubator THERMOCARE VITA konnte die Geräuschkulisse durch eine optimale Luftführung und das geräuschfreie Mikrobefeuchtersystem erheblich reduziert werden.



### Immer das richtige Klima

Luft- und Körpertemperatur, Feuchte und Sauerstoffkonzentration werden dem Bedarf des Säuglings entsprechend eingestellt und automatisch geregelt. Eine völlig neue Luftführungstechnik sorgt für eine gleichmäßige Warmhaltung des Patienten und minimiert die transepidermalen Wasserverluste.




### Maximale Hygiene

Das Mikrobefeuchtersystem mit offener Verdunstungswanne arbeitet geräuschlos und wird komplett gereinigt und desinfiziert. Es verbleibt kein Restwasser im System, daher besteht keine Kontaminationsgefahr. Wasser wird über handelsübliche Sterilwasserflaschen oder Beutel für Injektionszwecke zugeführt, ein Vorratsbehälter ist nicht erforderlich. Somit entfällt ein Umfüllen und die hiermit verbundenen Risiken werden vermieden.



### Monitor / Bedienterminal

Innovative Technologie regelt und überwacht die Werte für Luft- und Patiententemperatur sowie für Feuchte und Sauerstoffkonzentration. Die eingestellten Parameter und Messwerte werden klar gegliedert angezeigt, mit einer grafischen Darstellung des Verlaufs der letzten drei Stunden. Alle Informationen können über die Trendfunktion für den Zeitraum einer Woche zurückverfolgt, verglichen und ausgewertet werden.

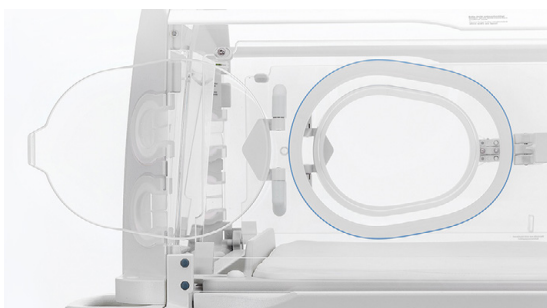

### Ergonomische Gestaltung

Das Doppelwand-Scheibensystem hat vier große Schwenkfenster. Diese lassen sich schnell und einfach durch Druck auf den Entriegelungsmechanismus (auch mit desinfizierten Händen) öffnen. Auch ein Öffnen beider Durchgrifföffnungen ist durch ein zentrales Drücken möglich.

Für Schläuche und Kabel sind genügend Durchführungsmöglichkeiten vorhanden.



Zum schnellen und großräumigen Patientenzugang lassen sich alle Scheiben sehr leicht mit einer Hand abklappen.

Die Haube kann einfach abgenommen werden.



Stabile Doppel-Leichtlaufrollen garantieren einen sicheren Stand des Inkubators und ermöglichen ein leichtes Fahren. Durch die Verwendung einer Rolle mit Richtungsfeststeller lässt sich das Wärmebett gut um Ecken und Einrichtungsgegenstände steuern. Vier Stoßabweisrollen schützen das Gerät, die Umgebung und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigung.




Die Liegefläche lässt sich mit einem Knopfdruck elektromotorsch sehr schnell in die notwendige Kopf-Hoch- oder Tieflage bringen. Der eingestellte Neigungswinkel wird sofort auf dem Monitor angezeigt.



Natürlich kann die Liegefläche für besondere Eingriffe auch komplett herausgezogen werden.

Der Inkubator ist auch mit einer integrierten Waage erhältlich.

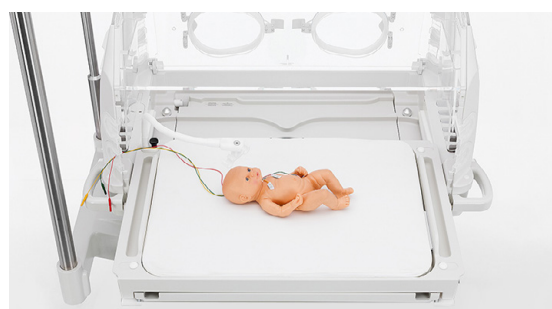

# THERMOCARE Vita

## Einfach, sicher, zuverlässig



### Einfaches Untersuchen

Zum Röntgen muss man das Scheibensystem nicht öffnen. Das Fach zum Einlegen der Röntgenkassette ist einfach von außen zugänglich. Das Mikroklima bleibt weiter erhalten.



### Immer die richtige Wärme

Sowohl als geschlossener Inkubator, als auch im Offenpflege-modus bietet die Ausführung Vita Vario gleichmäßige Wärme über den gesamten Behandlungsbereich.

Mit dem Standby-Wärmesystem steht sofort nach Öffnen der Haube Wärmeenergie zur Verfügung. Auch bei ausgezogener Liegefläche ist für ein optimales Wärmefeld gesorgt.



### Die wichtigsten Dinge stets zur Hand

Bei der Pflege ist es wichtig, die notwendigen Utensilien stets griffbereit zur Hand zu haben. Die Schubfächer des Wärmebettes lassen sich so öffnen, dass sie von allen Seiten und in jeder Situation zugänglich sind.



### Umfangreiches Zubehör

Die Zubehörkomponenten aus dem THERMOCARE und VARIO THERM-Programm sind kompatibel und lassen sich an den Normschienen und Edelstahlholmen anbringen.

 **WEYER**



 0197